



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

Strana: 1 z 3

DESUR

KONCENTROVANÝ KAPALNÝ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI PLOCH A PŘEDMĚTŮ

Oblast použití:

- DESUR je biocidní přípravek na aldehydické bázi. Používá se jako základní mycí a dezinfekční prostředek pro mytí a dezinfekci velkých prostor ve zdravotnictví, sociálních ústavech a veřejných budovách (typ PT2). Je nezastupitelný pro vznik případných rezistencí a střídání prostředků. Přípravek je baktericidní s účinností proti MRSA, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (1% roztok 20 °C)
čirá kapalina, zelené barvy	cca 1,0	< 7,0

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Přípravek se ředí studenou pitnou vodou. Dezinfekční účinek se dosáhne omýváním ploch roztokem, otíráním nebo ponořením předmětů do pracovního roztoku. Doporučuje se předem odstranit hrubé mechanické nečistoty. Ošetřené plochy se neutírají do sucha. Přirozené zaschnutí vytvoří ochrannou antibakteriální vrstvu. Významný prostředek proti nemocničním nákazám (MRSA). Dobře větrat obsahuje aldehydy, neobsahuje formaldehyd.

Základní způsoby aplikace a jejich podmínky jsou uvedeny v následující tabulce:

Aplikace	Aplikační koncentrace (ml přípravku na 1 L vody)	Doba expozice	Účinnost
Jednorázová dezinfekce a čištění povrchů	10 - 30	30 min anebo do zaschnutí	baktericidní včetně MRSA, fungicidní a virucidní
Pravidelné používání - kumulativní efekt proti plísním	5	30 min anebo do zaschnutí	Baktericidní a fungicidní
TBC, zvýšené riziko virových nákaz (epidemiologická situace)	20	60 min anebo do zaschnutí	baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, a mykobaktericidní

Výrobce:
MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz

Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

Strana: 2 z 3

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro dezinfekci povrchů, které lze čistit vodnými roztoky.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro dezinfekci povrchů z organických materiálů (způsobuje jejich žloutnutí). Prostředek má slabý redukční účinek, nesměšujte s žádnými dalšími chemickými přípravky.

Upozornění: dodavatel doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet.

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje:

glutardialdehyd 5 g/100 g, glyoxal 8 g/100 g, benzalkonium chlorid 4 g/100 g, 5 -15 % neionogenní tenzidy, parfém, D-Limonen, Citral, Citronellol, Linalool.

Standardní věty

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na genetické poškození při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechteje prochládnout. Při zástavě dechu, nebo nepravdělném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahe tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné limity pro ovzduší (NPK - P). Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru. Při použití přípravku nekuřte.

Výrobce:

MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961

Fax: +420 313 512 834

E-mail: firma@mpd.cz

www.mpd.cz

Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

Strana: 3 z 3

Skladování: pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Zabraňte styku s redukcujícími látkami. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Přeprava: je nebezpečné zboží – **UN 1760, LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.**, (Glutardialdehyd, Kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-18-alkyldimethyl chloridy).

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Likvidace odpadů: Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

Likvidace obalů: Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
1 l PE lahev	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L PE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

Výrobce:
MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz

Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001